


MoliCare® Premium Elastic

Conseils & aide à la pose

Avant
la pose de la protection

COMMENT CHOISIR LA BONNE TAILLE

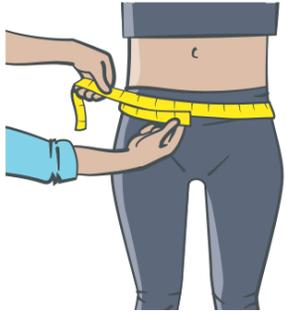

À l'aide d'un mètre ruban, prenez le tour de hanche.


ASTUCE : Prise ou perte de poids : mesurez régulièrement le tour de hanches.

TOUR DE HANCHES	TAILLES
70-90 cm	S 36-38
85-120 cm	M 38-48
115-145 cm	L 48-60
140-175 cm	XL > 60



PRÉPARER LA PROTECTION

Dépliez la protection et formez un godet.

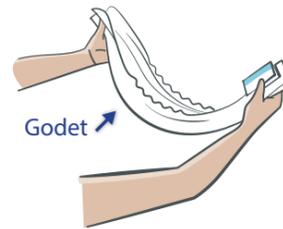

Cela permet de remonter les barrières anti-fuites pour une meilleure sécurité** et facilite l'utilisation lors de la pose.

NE SECOUEZ PAS LE CHANGE

afin de conserver les performances d'absorption.



Pendant
la pose de la protection


POSE ASSISE



Positionnez la protection sur la chaise et dépliez les ailes.



Asseyez-vous sur la protection, passez le godet entre les jambes, rabattez les ailes sur les hanches et collez les adhésifs sur chaque côté.

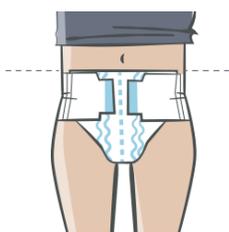

Vérifiez et repositionnez les adhésifs si nécessaire.

POSE DEBOUT



Visualisez la pose



Collez les adhésifs sur le T-Shirt (à l'avant) au niveau des hanches.



Installez la protection à l'avant. Déployez l'aile sur la hanche et collez l'adhésif.



Déployez l'autre aile et collez l'autre adhésif.


POSE COUCHÉE




Visualisez la pose



Positionnez la personne sur le côté, glissez une aile sous la hanche. Il faut veiller à avoir la même longueur de protection à l'avant et à l'arrière.

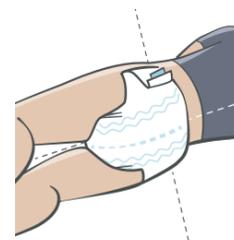

Centrez la protection à l'arrière à l'aide des traits pointillés (témoin de saturation).

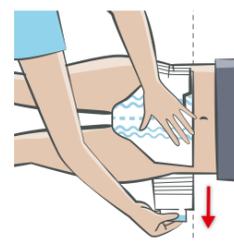

Dépliez les deux ailes et collez les adhésifs sur le devant.

Conseils
et astuces

Pour les hommes ou les personnes agitées



Vous pouvez mettre la protection à l'envers et la fixer à l'arrière.

Pour les ventres proéminents



Placez la protection sous le ventre et non par dessus.

Pour les personnes à mobilité réduite



Mesurez la distance entre les 2 extrémités des hanches et multipliez la distance par 2.

Autres astuces

Évitez la superposition de protections à l'intérieur.

N'hésitez pas à pincer sur l'adhésif pour une meilleure adhésion. Les adhésifs sont repositionnables.

